

### สวิตช์ฉุกเฉิน Emergency Switch

ใช้งานในห้องฉุกเฉิน, ห้องผู้ป่วย, ห้องน้ำผู้พิการ, ห้องน้ำผู้ป่วย




#### MY-C5

MY-C5 / 12 VDC

MY-C5 / 24 VDC

#### Emergency Switch

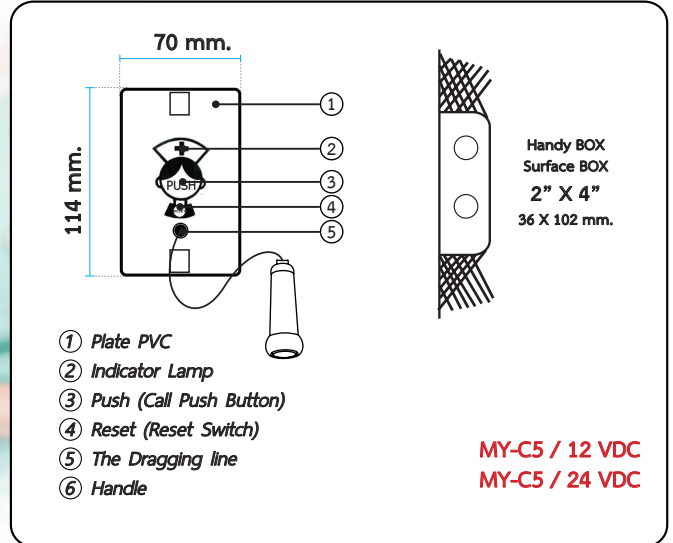


#### MY-C5 สวิตช์ฉุกเฉิน Emergency Switch พร้อมสายดึงสวิตช์

##### หน้าที่การทำงาน

1. Plate PVC : ทำจากพลาสติก สีเทาฟ้า
2. Indicator Lamp : LED โชน์การทำงาน
3. Push (Call Push Button) : ปุ่มกดเรียกขอความช่วยเหลือ, ปุ่มกดเรียกพยาบาล
4. Reset (Reset Switch) : สวิตช์สำหรับยกเลิกการทำงาน
5. The Dragging Line : สายดึงสวิตช์ขอความช่วยเหลือ, สายดึงเรียกพยาบาลสีส้ม ยาว 200 mm.
6. Handle : ด้ามจับดึง ทำจากพลาสติกสีขาว ยาว 95 mm.
7. MY-C5 / 12 VDC ใช้แรงดันไฟ 12 VDC
8. MY-C5 / 24 VDC ใช้แรงดันไฟ 24 VDC

##### รายละเอียด

1. สามารถกดเรียกที่ Push เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ เรียกพยาบาล พร้อมทั้งสามารถเรียกจากสายกด เพื่อเรียกขอความช่วยเหลือ
2. ไฟ LED สีแดง ติดสว่าง โชน์การทำงาน
3. สามารถยกเลิกการทำงานได้จากกรกดสวิตช์ Reset
4. สามารถต่อโคมไฟอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสงได้
5. ขนาด 70 X 114 X 25 mm.
6. ผลิตในประเทศไทย

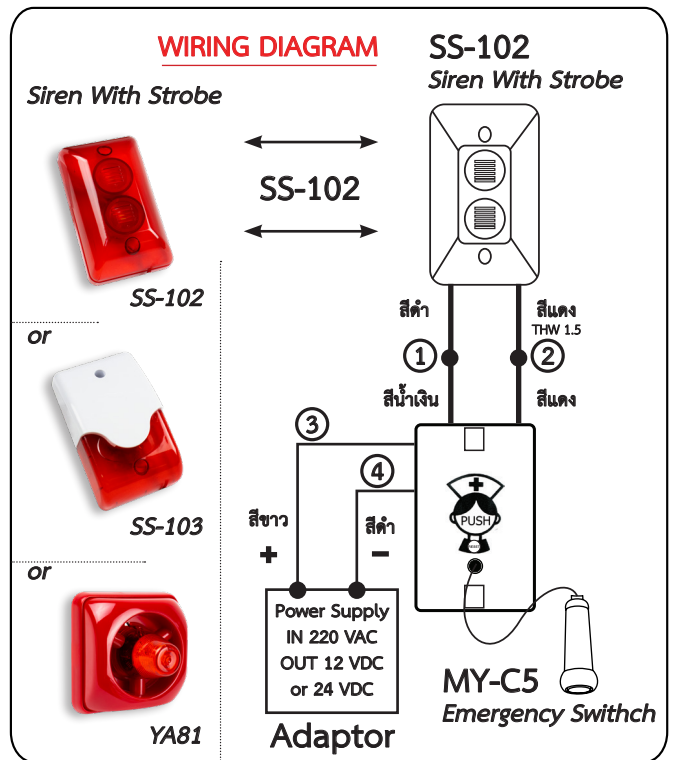

#### การติดตั้งอุปกรณ์ MY-C5

