


NEW PRODUCT

สวิตช์ฉุกเฉิน Emergency Switch

ใช้งานในห้องฉุกเฉิน, ห้องผู้ป่วย, ห้องนำผู้พิการ, ห้องนำผู้ป่วย

JNS-107

Emergency Switch
With Call Push Switch

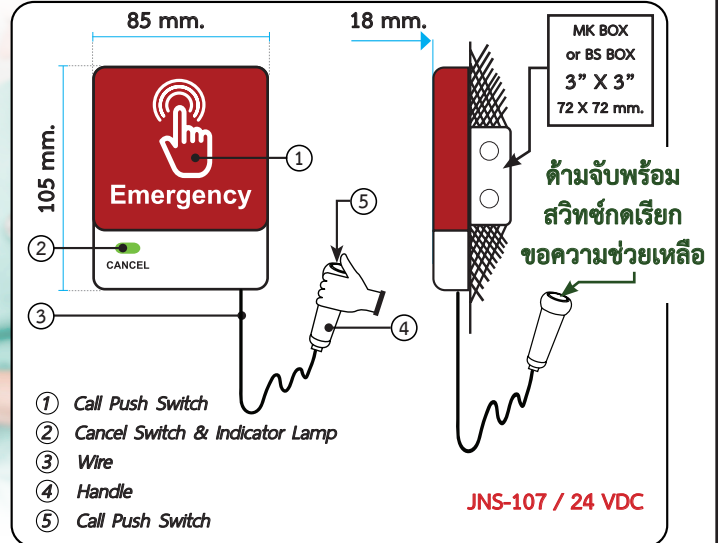


JNS-107 สวิตช์กดเรียกฉุกเฉิน พร้อมสายต่อสวิตช์กดเรียกขอความช่วยเหลือ

หน้าที่การทำงาน


1. Call Push Switch : สวิตช์ฉุกเฉินสีแดง, สวิตช์กดเรียกขอความช่วยเหลือ, ปุ่มกดเรียกพยาบาล ในห้องนำผู้พิการ
2. Cancel Switch & Indicator Lamp : สวิตช์ยกเลิกการทำงาน สีเขียวพร้อมไฟโชว์การทำงาน
3. Wire : สายไฟสีเทา ความยาว 1520 mm.
4. Handel : ด้ามจับสำหรับต่อปุ่มกดเรียก ความยาว 95 mm.
5. Call Push Switch : ปุ่มกดสำหรับกดเรียกขอความช่วยเหลือ
6. JNS-107 ใช้กับแรงดันไฟ 24 VDC

รายละเอียด

1. สามารถกดเรียก เพื่อขอความช่วยเหลือ สวิตช์กดเรียกสีแดง ขนาดใหญ่ และ สามารถกดเรียกที่สายกดเพื่อเรียกพยาบาล
2. ไฟ LED ติดสว่างโชว์การทำงาน
3. สามารถยกเลิกการทำงานได้จากการกดสวิตซ์ Cancel
4. สามารถต่อโคมไฟ Corridor Light
5. ขนาด 105 X 85 X 18 mm.
6. ใช้ร่วมกับชุดควบคุม COMMAX, Nurse Call System Master Station JNS12-72

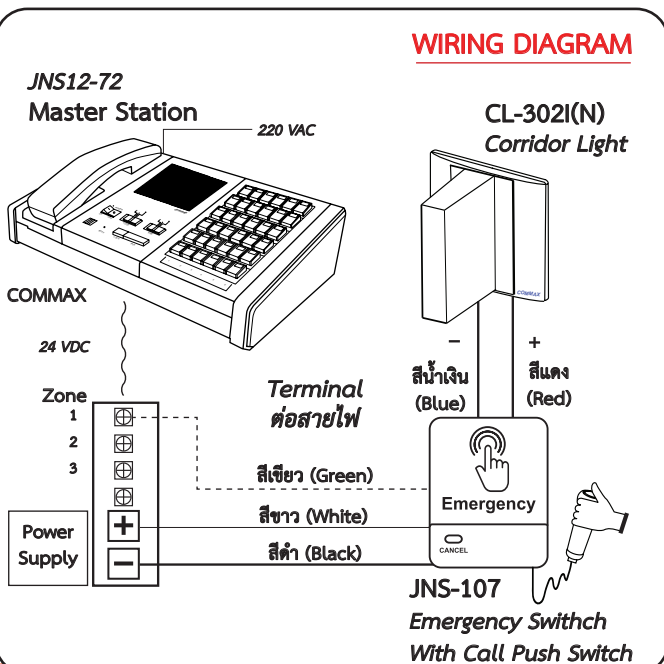

การติดตั้งอุปกรณ์ JNS-107

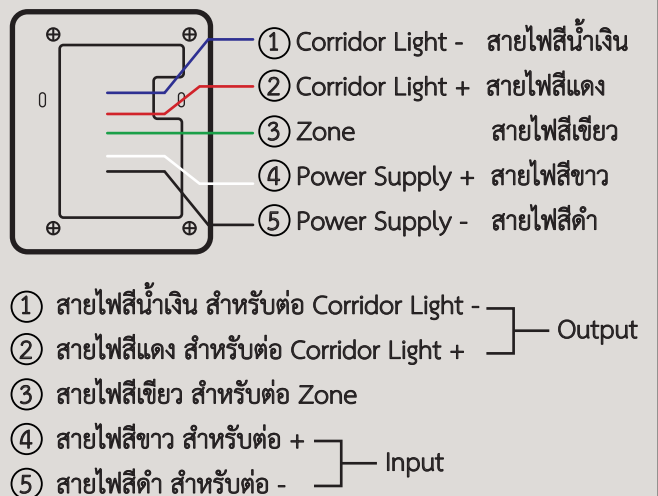

- ① สายไฟสีน้ำเงิน สำหรับต่อ Corridor Light -
- ② สายไฟสีแดง สำหรับต่อ Corridor Light +
- ③ สายไฟสีเขียว สำหรับต่อ Zone
- ④ สายไฟสีขาว สำหรับต่อ +
- ⑤ สายไฟสีดำ สำหรับต่อ -